

AED Checklist

In de maritieme sector is een goedwerkende AED van levensbelang. Of je nu op een schip, offshoreplatform of havenlocatie werkt, snelle en effectieve reanimatie kan het verschil maken. Daarom is regelmatig onderhoud en controle van je AED cruciaal.

Hieronder is een handige checklist te vinden, die jou helpt met het operationeel en inzetbaar houden van je AED.



Houdbaarheid van de elektroden

De houdbaarheidsdatum van de elektroden is te vinden op de verpakking. Oude elektroden geleiden minder goed, waardoor de levensreddende schok niet effectief kan zijn. Het is dus cruciaal dat je elektroden in goede staat zijn!

Verpakking van de elektroden

Is de verpakking van de elektroden onbeschadigd? Een geopende of beschadigde verpakking kan ervoor zorgen dat de geleidingsgel uitdroogt, wat de effectiviteit van de elektroden vermindert.



Statusindicator

Positieve indicator - vaak een groen (knipperend) lampje: Alle systemen werken! Je AED is klaar voor actie.

Negatieve indicator - vaak een rood (knipperend) lampje, soms met piepjes: Er is een probleem, controleer direct wat er mis is en raadpleeg de handleiding



Complete Rescue Kit aanwezig

Is er een complete Rescue Kit bij jouw AED aanwezig? Deze kit bevat alles wat je bij een reanimatie nodig hebt, zoals een schaar, scheermes, desinfectiemateriaal, een beademingsmasker en handschoenen.

[Bekijk hier de rescue kit](#)

Komt je er niet uit of heb je vragen?

Heb je vragen over AED's of onderhoud? Ben je niet zeker over de status van je AED? Of wil je simpelweg een vraag stellen of advies vragen? Medisol helpt je graag verder!

[Bekijk contactmogelijkheden](#)